

磁気刺激装置 スティムシュアー 販売開始のお知らせ

2021年12月
サイノシュアー株式会社

謹啓

サイノシュアー株式会社（本社：東京都新宿区）は、
2021年12月1日
「スティムシュアー」
の販売を開始致しました。


【使用目的又は効果】

磁気を用いて末梢神経を刺激し、生体の誘発反応の検査に用いる。


STIMSURE は磁気パルスを発生させ、筋肉を収縮 刺激します。
筋肉組織の反復収縮を引き起こし、収縮は様々な強さに調整することが可能です。




How does it work?

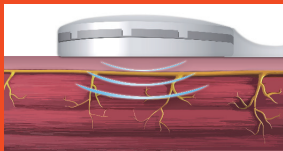


1. StimSure から発生される磁気パルスはアプリケーターを介して筋肉組織に伝達されます。

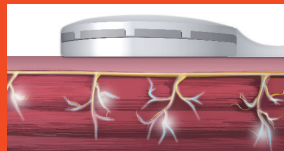

2. この磁気パルスは渦電流を発生し、筋肉を刺激/収縮します。

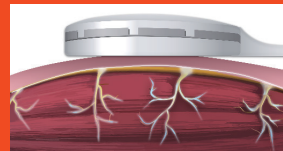

3. 筋肉は、非侵襲的な磁気パルスに応答し、筋肉組織の反復収縮を引き起こします。

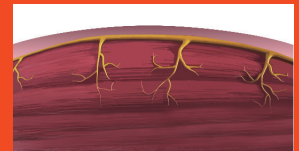

4. この一貫した筋肉の収縮がより効率的な筋肉繊維の刺激につながります。

豊富なプログラム


- StimSure は4つのプログラムを初期搭載しております。
Beginner Standard Professional and High Intensity
- さらに4つの部位に特化したプログラムも初期搭載しております。



- プログラムはジムのように Warm Up, Activate, Cool Down で構成されています。
- また、患者様に合った独自のプログラムを作成することも可能です。

筋肉繊維タイプに合わせる

活動電位の周波数を変えることでそれぞれの遅筋、速筋線維に合った動きを与えることが可能です。

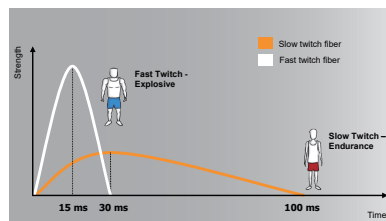

アプリケーター

20-30分の時間において、約24,000回のTwitch(筋痙攣)を引き起こし筋肉を刺激します。



カタログ請求、商品情報に関するお問い合わせは弊社までお寄せください。

謹白

 **CYNOSURE**

サイノシュアー株式会社

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2丁目1-7 中央ビル1階

お問い合わせ先 (受付時間: 9:30 ~ 18:00 土日休日を除く)

製品に関するお問い合わせ: TEL: 0120-933-814 EMAIL: infojp@cynosure.com

3
years
of **BEAUTIFUL ENERGY**